

1.

Pipetkou nasajte moč.



Tehotenstvo = pozitívny výsledok:

v okienkach „T“ a „C“ (na prúžku) sa objavia dve ružové čiarky, čo znamená, že v moči je prítomný hormón HCG. Ak je čiarka v okienku „T“ (na prúžku spodná) slabšia, je možné, že hladina hormónu HCG je ešte nízka.

Na potvrdenie tehotenstva si môžete test zopakovať s novou doštičkou (prúžkom) po 24 hodinách.

Negatívny výsledok:

objaví sa len jedna ružová čiarka, ktorá potvrdzuje negatívny výsledok, ako aj to, že test je urobený správne. Ak sa však menštruácia v stanovenom termíne nedostavila, zopakujte test s novou doštičkou (prúžkom) po 24 hodinách.


2.

Okienko naplňte močom až po okraj (4 kvapky).




3.

Výsledok sa objaví v priebehu 3 minút

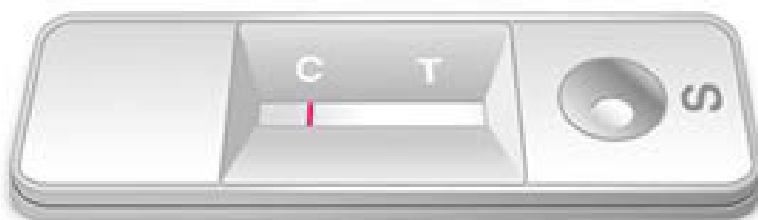

NEGATÍVNY

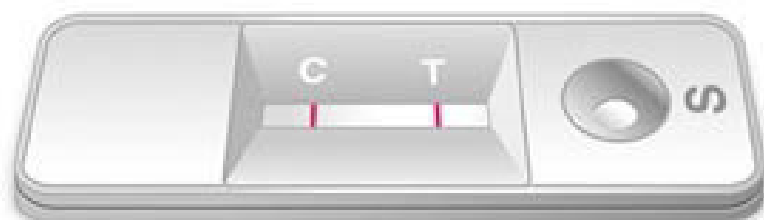

POZITÍVNY